

1

Utrustning

Dina märken kommer i ett blister för varje märke och djur. Handel (nålen i märket), Hondel med vit kopp och grön underdel. Provrör att klämma ihop med nålen (provet) efter märkning.

Tången används under hela processen



2

Förberedande

Ta bara fram ett märke (blister) åt gången för att inte blanda ihop prover.

Sätt i Handelen med nålen i den runda öppningen i tången. Tryck in spärren på tången som i första bilden.

Sätt i hondelen i andra käften på tången, likt ett vanligt märke. Den gröna delen mot nålen.



3

Märkning

Hitta ett ställe i grisens öra för håltagning. Se till att det är fritt från brosk och ådror.

Lägg an nålen mot örat försiktigt

Ta ett tvåhandsgrepp om tången och tryck till distinkt hela vägen igenom tills tången är helt ihop.

Släpp taget om tången som fjädrar tillbaka och dra undan tången från hondelen.



Märkning

Kontrollera så att märket sitter bra och går att rotera i örat på grisen.

4

Provet

För att veta att ett prov är med och lyckat bör du antingen se en bit av provet i nålen, eller att du ser en grön bit från hondelens gröna hinna. Då har du ett prov med i nålen.

Ta fram provröret. Kontrollera så att det har samma nummer som märket du just märkte grisen med.



5

Provröret

Sätt tuben i den vita hylsan (där hondelen satt innan märkning)

Akta så att du inte skär dig på nålen.

Tryck ner nålen i tuben genom att trycka ihop tången igen.

Nålen och tuben förseglas nu genom ett litet klick i bottenläget av tången.

Provet är klart att sändas in.



5



Färdigt DNA prov

Provet är nu helt klart för att sända i den returpåse och etikett som följde med leveransen.

Provet bör skickas inom en vecka från provtagning till mottagaren.

Vid längre lagring, lagra provet i kylskåp. I kylskåp kan provet lagras i upp till ett år.